

■ Пуск анализатора



■ Пробоподготовка

Цельная кровь



Плазма

Сыворотка



- * Используйте литий-гепариновые пробирки для отбора проб (зеленая или фиолетовая крышка).
- * **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** натрий-гепариновые пробирки.
- * **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** пробирки с ЭДТА.
- * После взятия пробы цельной крови выполните тест в течение 60 минут при комнатной температуре.
- * Отбирайте пробу крови не менее половины пробирки.
- * Используйте пробирки с активатором свертывания сыворотки (золотистая крышка).
- * (Цвет крышки у производителей разных стран может различаться)

■ Анализ проб

Шаг 1: Подготовка реAGENTного диска

Замечания



1. Разорвите упаковку с угла пакета.



2. Двумя пальцами достаньте диск вместе с тканевым пакетом.



3. Возьмите диск другой рукой за край.



4. Снимите тканевый пакет.



5. Удалите полосу фольги, закрывающую отверстие для ввода проб

- * Храните реAGENTные диски при 2-8°C, но подогревать их для проведения теста не надо.
- * Не оставляйте закрытые реAGENTные диски при 25°C более чем на 48 часов.

Шаг 2: Ввод пробы

Замечания




1. С помощью пипетки-дозатора, входящей в комплект поставки, отмерьте 220 мкл пробы.



2. Держите пипетку строго перпендикулярно поверхности реAGENTного диска. Нажмите кнопку дозатора до конца для добавления всего объема пробы.

- * При использовании пипетки-дозатора старайтесь, чтобы воздух не попадал в наконечник дозатора.
- * Наконечник дозатора должен лишь слегка касаться дна камеры для ввода пробы, не давите на него сильно во избежание деформации наконечника.
- * После полного добавления пробы в реAGENTный диск извлеките наконечник дозатора из отверстия для ввода пробы, удерживая кнопку нажатым, чтобы избежать обратного затягивания в дозатор пробы из диска.
- * Не давите на кнопку дозатора несколько раз, это может вызвать ошибку объема дозирования пробы.
- * Выполните тест в течение 10 минут после добавления пробы в реAGENTный диск.

Шаг 3: Выполнение теста

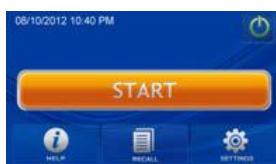


1. Нажмите кнопку **START** на экране для открывания отсека для диска




2. Придерживая диск за край, осторожно поместите диск в отсек.



3. Введите ID пациента и нажмите **OK**.

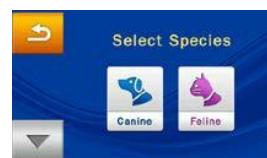

4. Выберите вид животного. *Если выбрана опция заголовка отчета (Report Heading), будет выдана подсказка ввести вид животного и вес. По завершении нажмите **OK**.

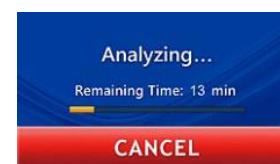


5. Анализатор начнет выполнение теста и на экране появится надпись **"Analyzing..."**

Шаг 4: Результаты теста



1. Будет автоматически показан отчет с результатами теста, который может быть распечатан.

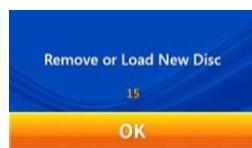

2. Для открывания отсека нажмите **HOME** и достаньте диск. Тест завершен.