

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

1. Наденьте манжету соответствующего размера на пациента. Оптимальное место наложения - основание хвоста или предплечье. При плотном наложении манжеты индексная линия на манжете должна находиться в пределах обозначенного на манжете диапазона.
2. Давление следует измерять в положении сидя или лежа. В положении сидя следите за тем, чтобы манжета находилась на уровне сердца и конечность была полностью расслаблена. Животное не должно опираться на эту конечность!
3. Подключите трубку манжеты к коннектору Тонометра. При необходимости используйте удлинительную трубку.
4. Для запуска измерения нажмите кнопку «НИАД Старт». При удачном завершении измерения на экране отобразятся значения Систолического, Диастолического и Среднего АД, и Частоты Пульса. Достоверность измерения можно оценить по форме Осциллометрической кривой, а также по количеству зеленых точек в поле Индикатора Качества Измерения.
5. В Ручном режиме измерения будут инициироваться только по нажатию кнопки «НИАД Старт». Если Вам требуется проводить измерения периодически с заданным интервалом времени, зайдите в Настройки, откройте вкладку НИАД, установите режим Авто и выберите необходимый интервал измерения. После этого запустите первое измерение кнопкой «НИАД Старт». Все последующие измерения будут выполняться автоматически.
6. Для запуска цикла измерений в режиме STAT откройте Меню Дополнительных Операций и выберите позицию «STAT Старт». Измерения будут проводиться непрерывно в течение 5 минут. Остановить измерения можно нажатием кнопки «НИАД Стоп».

Внимание! Ознакомьтесь с Разделом «Факторы, приводящие к ошибкам измерения АД» Руководства по Эксплуатации.