

Устройство для обогрева пациента
ветеринарное
Zoomed VetPad



Руководство пользователя

Оглавление

1. Описание прибора	3
2. Основные меры безопасности	4
3. Меры предосторожности при использовании	4
3.1 Перед использованием	4
3.2 Во время использования	4
3.3 После использования	5
4. Замечания по установке: Подключение и закачка воды	5
5. Основные функции	6
6. Инструкции по применению	6
6.1 Режим сна	6
6.2 Режим «Защита от клещей/сушка»	6
6.3 Время	7
6.4 Блокировка от детей	7
7. Инструкции по дренажу	7
8. Метод поиска и устранения неисправностей	8
9. Гарантия	8
10. Контактная информация	8

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Описание прибора

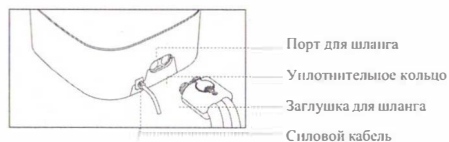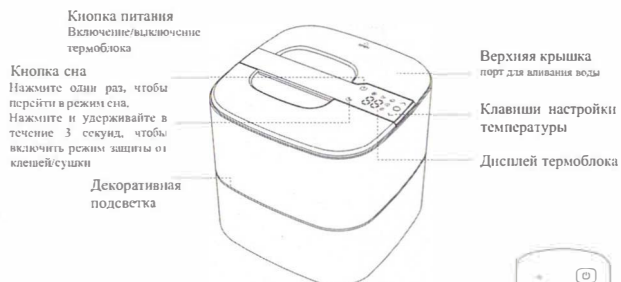

Описание значков дисплея

	Режим сна		Кнопка питания
	Режим защиты от замерзания		Кнопка повышения температуры
	Блокировка от детей		Кнопка понижения температуры
	Время		Индикатор нехватки воды



Пульт управления



Дисплей термоблока

2. Основные меры безопасности

1. Разделение воды и электричества: нагрев вне нагревательной магистрали, нет риска поражения электрическим током.
2. Отказ и отключение питания: термоблок наклоняется, выгружается и автоматически отключается при подъеме. Нет риска утечки электроэнергии.
3. Защита от замерзания и растрескивания: когда температура в резервуаре для воды основного блока ниже 5°C, он автоматически открывается и защищает от замерзания.



4. Нет электромагнитного излучения



5. Защита от перегрева



6. Защита от нехватки воды и ожога



7. Блокировка от детей



8. Таймер выключения



9. Автоматическое отключение через 24 часа

3. Меры предосторожности при использовании

3.1 Перед использованием

1. Термоблок рекомендуется подключать к матрасам той же модели.
2. Убедитесь, что термоблок стоит устойчиво, иначе это может вызвать некорректный запуск прибора.
3. Убедитесь, что заглушка шланга правильно подсоединена к интерфейсу шланга термоблока, а матрас расположен ровно.
4. Перед первым наполнением водой убедитесь, что соединение между термоблоком и матрасом нормальное, а матрас расположен ровно.
5. При заливке воды уровень воды не должен быть выше заливного отверстия.

3.2 Во время использования

1. Во время работы запрещается разделять термоблок и матрас во избежание ожогов.
2. Когда на мониторе термоблока отображается сообщение о нехватке воды, добавьте воды перед использованием матраса. Если вы добавите слишком много воды, она может вытечь из вентиляционного отверстия во время нагрева. В этом случае выключите термоблок и слейте около 50 мл воды, чтобы вернуться к нормальному уровню.
3. Если термоблок наклонен, то из вентиляционного отверстия на крышке бака для воды из термоблока может вытесняться вода.
4. Не закрывайте вентиляционное отверстие на крышке бака для воды, это может привести к повреждению изделия или телесным повреждениям.
5. Избегайте скручивания и деформирования соединительного шланга матраса, чтобы не повлиять на циркуляцию воды и нагревательный эффект.
6. При использовании острых предметов, таких как иглы или гвозди, рядом с матрасом, не вставляйте острые предметы в матрас, чтобы избежать прокола силиконовой трубы магистрали и нарушения циркуляции воды; избегайте попадания острых предметов в резервуар для воды. Это может помешать нормальной работе термоблока.

7. Если термоблок и детали повреждены, верните его на завод для ремонта или обратитесь в компанию официального дистрибьютера для диагностики и ремонта. Не разбирайте его самостоятельно.

8. Пациентам с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями перед применением этого продукта следует проконсультироваться с врачом.

3.3 После использования

1. Если вы не используете его в течение длительного времени, слейте воду из термоблока и матраса.

2. Если не используете термоблок в течение длительного времени, для очистки накипи перед использованием: добавьте воды и включите его, дайте воде циркулировать в матрасе в течение нескольких минут, выключите штатные и откройте крышку резервуара для воды, вылейте воду и снова наполните резервуар для воды. Повторите эту операцию 2-3 раза, чтобы очистить термоблок перед использованием.

4. Замечания по установке: Подключение и заправка воды



Поставьте термоблок на устойчивое место

Сожмите стороны заглушки шланга

Вставьте заглушку шланга до щелчка, чтобы завершить соединение


Подключите к розетке и коснитесь, чтобы включить

Закройте крышку бака для воды после наполнения

1. Поместите термоблок на ровную сторону кровати, устойчивую тумбочку возле кровати или пол и разложите матрас на кровати (конец шланга нужно расположить близко к термоблоку).

2. Когда шланг вставлен в порт подключения термоблока, раздастся звуковой сигнал «щелчок», указывающий на успешное соединение.

3. После включения термоблок издает звуковой сигнал, а дисплей и индикатор включения мигают один раз, указывая на то, что термоблок включен.




4. Когда воды станет недостаточно, индикатор нехватки воды «» начнет мигать. Термоблок издает непрерывный звуковой сигнал. После наполнения водой, значок нехватки воды перестает мигать, звуковой сигнал прекращается. Общее потребление воды в первый раз составляет около 1 литра.

Рекомендации



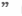

Рекомендуется использовать чистую воду.
Запрещается добавлять кипящую воду, водопроводную воду, морскую воду или другие жидкости, а также посторонние предметы в термоблок, чтобы не повредить на его жизнь и не вызвать порыв или даже поломку.

5. Основные функции

Выключатель питания	Включение и выключение термоблока.
Режим умного сна	Засыпание, легкий сон, глубокий сон, бодрствование, четырех-сегментная кривая изменения температуры ядра. Интеллектуальный контроль температуры улучшает качество сна.
Пользовательские настройки температуры	Включите, нажмите “  ” или “  ”, чтобы отрегулировать температуру.
Защита от клещей/сушка	При температуре 60°C требуется 2 часа до полного избавления от клещей/полной сушки.  Во избежание ожогов категорически запрещается включать эту функцию, когда кто-то находится на матрасе.
Интеллектуальная память	Отключение питания во время работы термоблока, при повторном включении автоматически вернет значение температуры, которое было установлено до отключения питания.

6. Инструкции по применению



6.1 Режим сна

- Однократно нажмите Smart Sleeping Eye, чтобы включить функцию контроля температуры Smart Sleeping Eye, которая интеллектуально подстраивается изменение внутренней температуры человеческого тела.
- Нажмите “” или “” для автоматического выхода из функции Smart Sleep, и перехода в пользовательский режим настроек температуры.




Экран монитора

6.2 Режим «Защита от клещей/сушка»

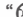Метод 1: Нажмите на пульте дистанционного управления “” или “” кнопку для включения режима «Защита от клещей/сушка».



Экран монитора

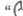Метод 2: Нажмите и удерживайте кнопку “” в течение 3х секунд, чтобы включить режим «Защита от клещей/сушка».

Описание режима: режим «Защита от клещей/сушка». Когда индикатор загорается, температура воды автоматически устанавливается на отметке 60°C и держится 2 часа, после чего температура воды снижается до 32°C.

6.3 Время

Нажмите кнопку таймера на пульте дистанционного управления, войдите в настройки таймера и нажмите “^” или “v” установите нужное время.

1. Мигание прекращается через 5 секунд. Начинается обратный отсчет времени.
2. Прибор настроен на заводе, термоблок не имеет настроек времени.



Час

6.4 Блокировка от детей

Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку блокировки от детей “☺”. Функция блокировки включена. В это время термоблок и пульт дистанционного управления блокируются, чтобы предотвратить неправильное использование детьми. Снова нажмите кнопку “☺”, чтобы выключить функцию блокировки от детей. Обычно сразу после включения термоблок разблокирован.



Экран монитора


7. Инструкции по дренажу

Дренаж термоблока:

1. Отключите термоблок от источника питания и отсоедините штекер шланга от главного шланга. Откройте крышку резервуара для воды, поднимите ручку спуска воды, чтобы слить воду.
2. Во избежание травм, перед сливом воды убедитесь, что температура воды в резервуаре является безопасной.

Дренаж матраса:

1. Подготовьте контейнер для воды. Отключите источник питания и отсоедините шланг и заглушку шланга от термоблока, открутите винт на заглушке шланга с помощью крестовой отвертки.
2. Раскройте верхнюю и нижнюю раковину шпательной вилки шланга, отключите силиконовый шланг, поместите трубку в емкость для воды, слейте воду.
3. Для более полного слива воды, пожалуйста, поднимите конец матраса.

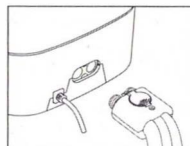

8. Метод поиска и устранение неисправностей

Аномалии	Причина	Метод исключения
Не загружается	Питание не подается	Проверьте, правильно ли подключен шнур питания
	Сбой загрузки	Отключите шнур питания, подождите три секунды, снова подключите питание и включите
	Повреждение продукта	Немедленно прекратите использование, обратитесь к дилеру
Плохой нагрев	Засорение трубы	Выровняйте прокладку для сантехники, распрямите соединительную трубу и проверьте, нет ли засоров
	Нехватка воды в водяном баке термоблока	Добавьте очищенную воду согласно инструкции
	Неправильная установка температуры	Циклическая температура
	Повреждение продукта	Немедленно прекратите его использование, обратитесь к дилеру

9. Гарантия

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента реализации. Не покрываются гарантией следующие условия:

- Несоблюдение инструкций и мер предосторожности приводят к выходу изделия из строя.
- Случайные катастрофы и другие факторы такие как высокое напряжение, пожар, наводнение, землетрясение и т.д. вызывают поломку изделия.
- Истечение гарантийного срока.
- Клиент не имеет права изменять, использовать не по назначению, или повреждать товар.
- Условия использования выходят за рамки нормативных требований к продукту.

Пожалуйста, храните гарантийный талон должным образом. Обновления продукта, спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактическая форма и цвет продукта могут немного отличаться от показанного на картинке.

10. Контактная информация

Официальный дистрибьютор в РФ: ООО «ЗООМЕД»

Телефон: 8(800)500-30-85