


Инструкция по сборке стойки с электрическим приводом для портативного рентгеновского аппарата




1. Вскройте коробку и достаньте из неё составные части стойки.




2. Установите основание стойки на ровную поверхность.

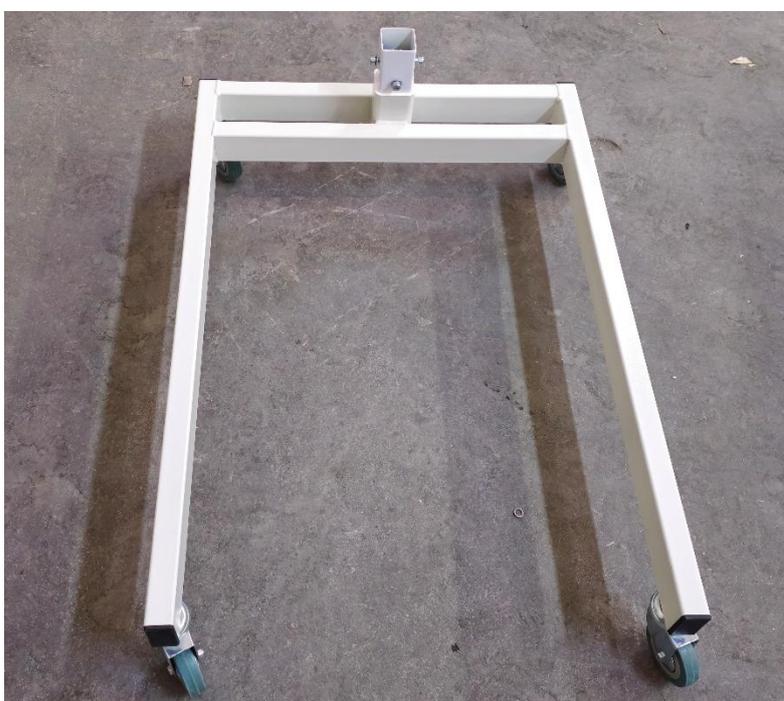

3. Зафиксируйте задние колеса стойки в положение стоп для ее фиксации на поверхности.

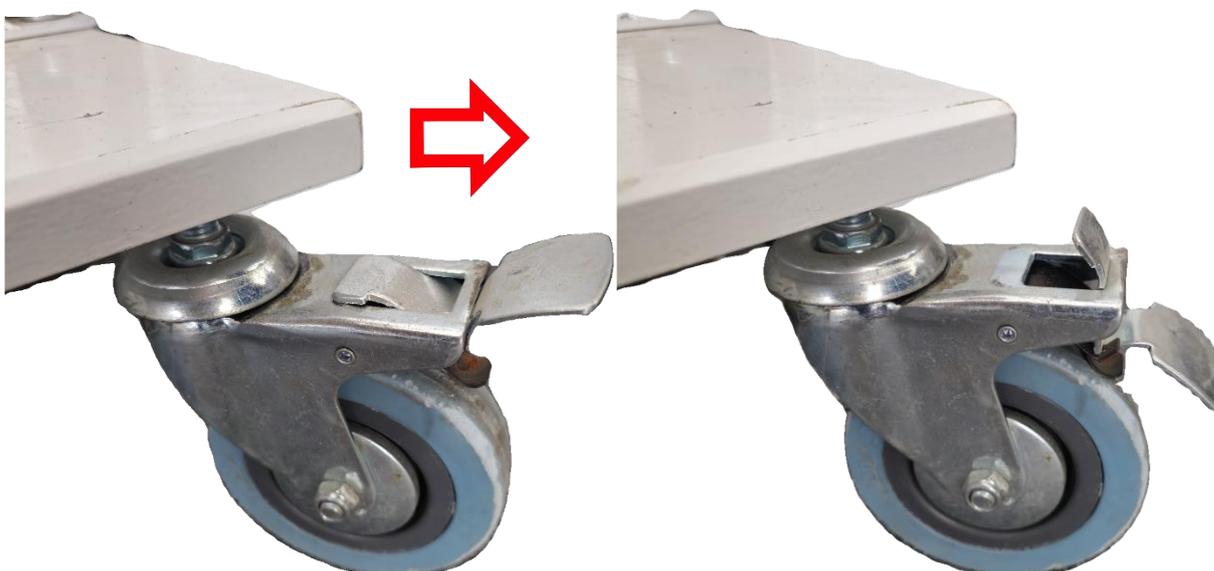

4. Для монтажа вертикальной балки к основанию стойки выкрутите четыре болта шестигранником.

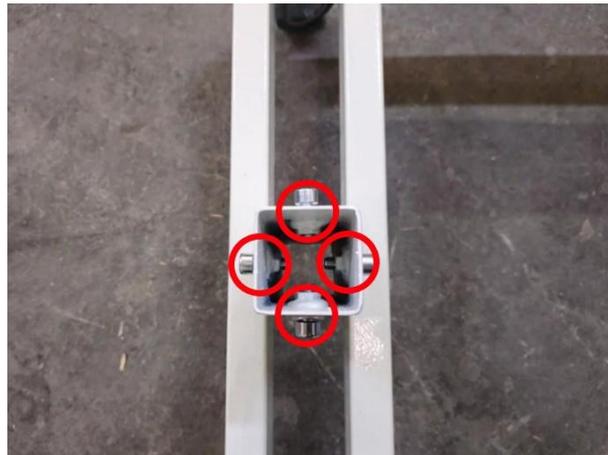


5. Установите балку до упора, чтобы отверстия на балке и основании стойки совпадали.



6. Зафиксируйте балку болтами, затяните их шестигранником.



7. Для монтажа стойки с приводом открутите болты шестигранником от уже установленной балки.

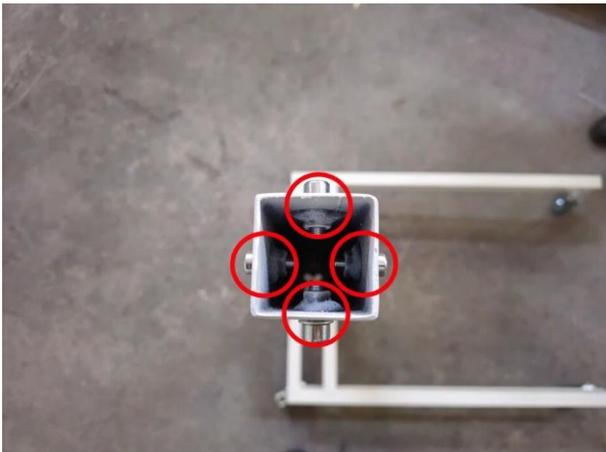

8. Установите стойку до упора, чтобы отверстия совпадали.





9. Зафиксируйте её болтами и затяните их шестигранником.



10. Закрутите ручки.



11. Закрепите портативный рентгеновский аппарат на стойке.

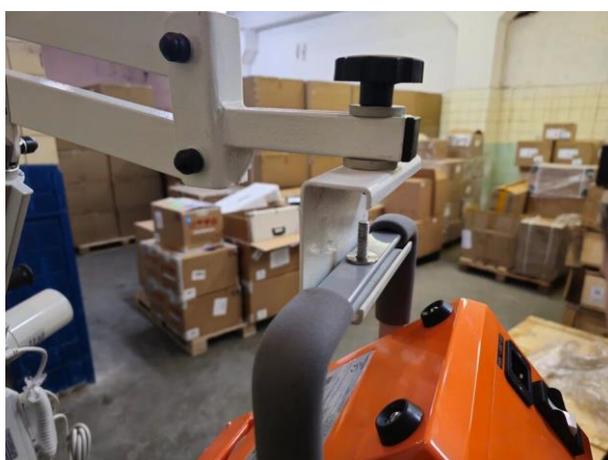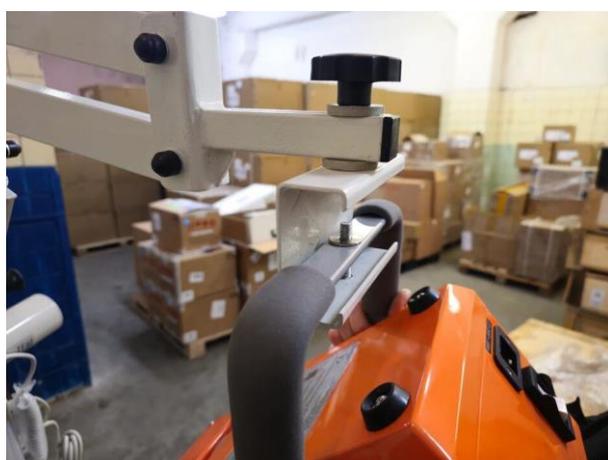

12. Расположите пульт для изменения высоты стойки на ручке.

