

Инструкция по сборке стола рентгенпрозрачного типа «Профи»



1. Вскройте коробку и достаньте из неё составные части стола.



2. Расположите каркас на ровную чистую поверхность указанным способом, разместите ножки столешницы с одной стороны.



3. Установите деталь для дальнейшего закрепления кронштейна и расположите ножки столешницы с другой стороны.



4. Поднимите профиль каркаса до уровня отверстий на ножках и зафиксируйте его.



5. После закрепления профиля переверните стол.



6. Разместите и закрепите столешницу.




7. Приготовьте детали для сборки телескопического кронштейна.





8. Соберите кронштейн.



9. Закрепите поддержку кронштейна.

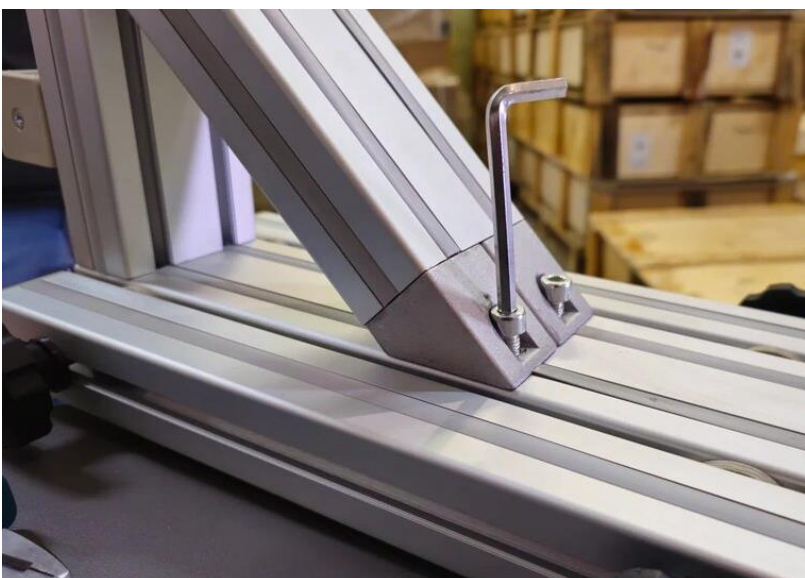


10. Закрепите кронштейн к столу.

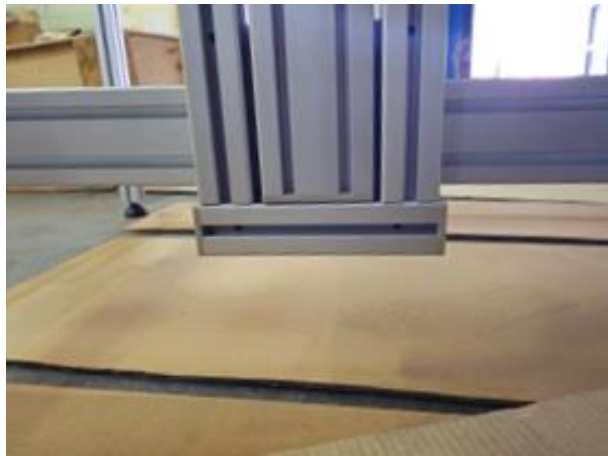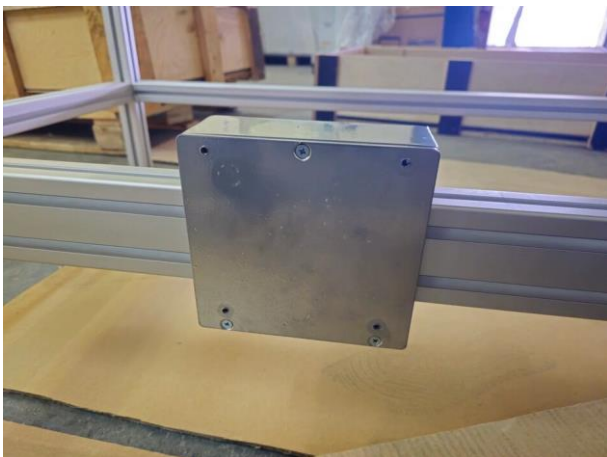




11. Установите торцевые заглушки.

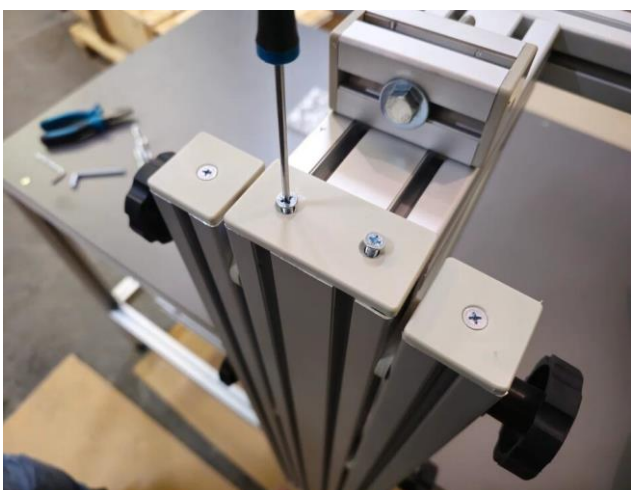

12. Установите пластиковые заглушки.



13. Закрепите рентгеновский аппарат на кронштейне.

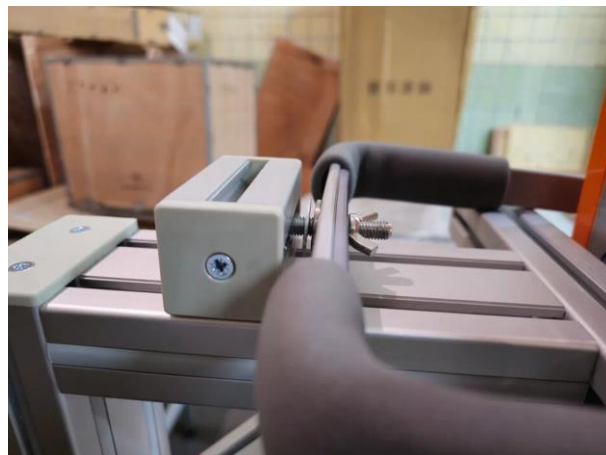

14. Для регулировки высоты кронштейна ослабьте четыре черных стопорных винта (по два с каждой стороны). Установите его на нужной высоте и закрутите винты для его фиксации.

