

Инструкция по эксплуатации анализатора Mindray BC-2800Vet

Гематологический анализатор BC-2800Vet является технологичным и сложным лабораторным оборудованием, которое требует правильной эксплуатации и обслуживания. Рекомендуется при покупке анализатора оформлять услугу ввода анализатора в эксплуатацию. После приобретения анализатора перед началом работы обязательно ознакомьтесь с руководством оператора, которое приложено к каждому анализатору.

Ежедневно

- Для обеспечения стабильной работы анализатора и точных результатов анализа обязательно выполняйте процедуры «Отключение» или «Очистка очистителем E-Z» с использованием реагента V-28 E-Z после непрерывной работы анализатора в течение 24 часов (см. пп. 6.10 и 10.3.7 руководства оператора).

Еженедельно

- Если анализатор используется круглосуточно, выполняйте процедуру «Очистка очистителем зонда» с использованием реагента V-28P один раз в три дня. Если анализатор ежедневно выключают с использованием специальной процедуры выключения, необходимо выполнять данную процедуру еженедельно (см. п. 10.3.6 руководства оператора).

По мере необходимости

- При подозрении на загрязнение камеры выполняйте процедуру «Очистка камеры» (см. п. 10.3.9 руководства оператора).

- Когда количество обработанных проб достигает 100, появляется напоминание о необходимости выполнить процедуру «Очистка очистителем зонда» с использованием реагента V-28P и «Очистка очистителем E-Z» с использованием реагента V-28 E-Z (см. пп. 10.3.6 и 10.3.7 руководства оператора).

- Когда суммарное число обработанных проб достигает 4 000, появляется напоминание о необходимости выполнить процедуру «Очистка блока промывки» с использованием реагента V-28P (см. п. 10.3.12 руководства оператора).

- Если анализатор не планируется использовать в течение двух недель или более, выполните процедуру «Подготовка к транспортировке», чтобы опорожнить и промыть линии для жидкостей, а затем протрите анализатор насухо и упакуйте его для хранения (см. п. 10.3.13 руководства оператора).

- Для поддержания анализатора BC-2800Vet в хорошем рабочем состоянии рекомендуется раз в год проводить профилактические работы в авторизованном сервисном центре.

Скачать руководство оператора в электронном виде можно на нашем сайте по ссылке:

[https://www.zoomed.ru/upload/iblock/d09/BC-2800%20Руководство%20оператора%20\(2019\).pdf](https://www.zoomed.ru/upload/iblock/d09/BC-2800%20Руководство%20оператора%20(2019).pdf)

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется при возникновении неисправностей анализатора, связанных с нарушением правил эксплуатации и обслуживания.

По вопросам ремонта и сервисного обслуживания анализатора обращайтесь в сервисную службу Группы компаний Ист Медикал по телефону +7 (800) 500-30-85 или отправляйте свои вопросы на нашу почту e-medical@inbox.ru