


ШАГ 1:


1. Включите прибор тумблером на задней части анализатора, дождитесь полного включения. Нажмите "АНАЛИЗ"



2. Отсканируйте QR-код с упаковки реагентного диска с правой стороны анализатора

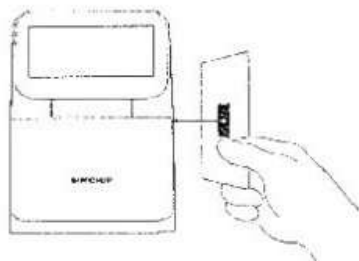


ШАГ 2: Откройте упаковку и достаньте реагентный диск.

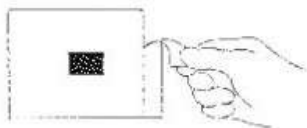


Диски можно использовать сразу после холодильника без нагревания до комнатной температуры


ШАГ 3: Положите диск на стол

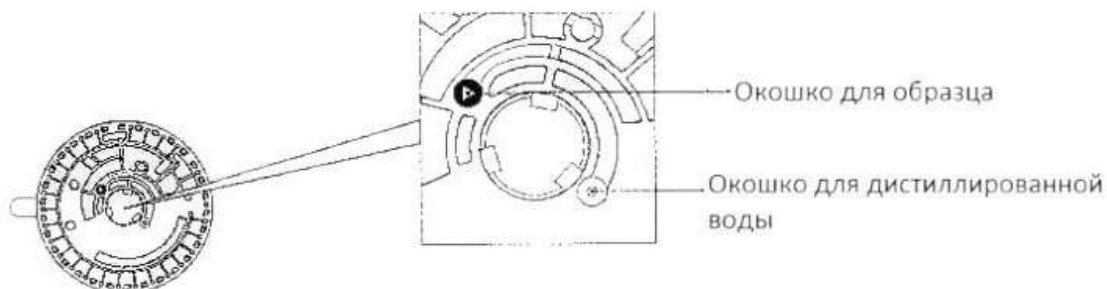

1. Наберите 100 мкл образца дозатором

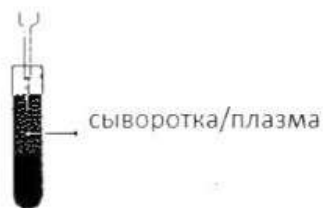

2. Добавьте образец в красное окошко диска держа дозатор под углом

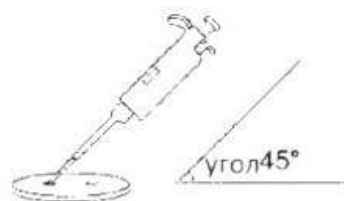


3. Наберите 430 мкл дистиллированной воды дозатором

4. Добавьте воду в белое окошко диска 




Шаг 4. Проведение анализа.


1. Поместить диск на выдвижной столик. Удалить защитную голубую пленку.

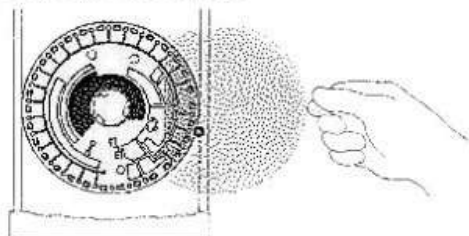

3. Ввести информацию об анализе.

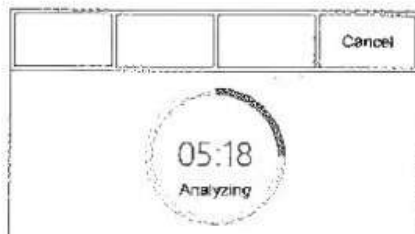

2. Нажать "Закрыть"

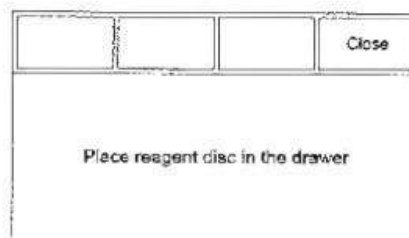

4. После завершения анализа результат отобразится на экране и распечатается на принтере.

	Page Up	Page Down	Open	
Name: ID: ID0001		Age: 10year		
Department: Surgery		Gender: Female		
Sample type: Serum		Patient Area: Out-patient		
Lot: 95512-282-16-500609-0				
Item Name	Result	Indicator	Range	Unit
ALB	68.6		40-50	g/l