

# Ветеринарный фиброоптический ларингоскоп с Клинками Миллера, VET-1700

## VitaVet Pro

### Руководство по эксплуатации

- ▶ Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и обслуживанием ларингоскопа.
- ▶ Операция по введению эндотрахеальной трубки, осмотра и прочие манипуляции, проводимые с помощью данного ларингоскопа, должны выполняться только квалифицированным ветеринарным специалистом.
- ▶ Стерилизуйте клинок после каждого использования, так как использование нестерильного клинка может повлечь за собой инфицирование животного.
- ▶ Тщательно проверьте ларингоскоп перед использованием. Если вы обнаружили неисправность, не используйте прибор.

#### Инструкция по сборке:

- Вставьте крючок клинка в соединительную головку рукоятки;
- Зафиксируйте клинок в рабочем положении;
- Когда клинок находится в рабочем положении, включается питание, и лампочка светится, снимите клинок с рукоятки после завершения операций, чтобы выключить лампочку и сохранить энергию батареи.

#### Батарея

- Для этого изделия используются две щелочные батареи типа С, 1,5 В (в комплект поставки не входят);
- Чтобы заменить батареи, снимите крышку батарейного отсека, выньте использованные батареи;
- Вложите новые батареи в батарейный отсек, убедитесь, что тип батареи выбран правильно, и соблюдена полярность батарей;
- Затяните крышку батарейного отсека;
- Установите клинок и проверьте яркость;
- Утилизируйте использованные батареи должным образом, не сжигайте их.

#### Обслуживание

- Содержите клинки и рукоять чистыми и сухими, содержание во влажных условиях может привести к коррозии изделия;
- Вынимайте батареи после использования, чтобы предотвратить повреждение рукоятки;
- Вымойте изделие под проточной водой сразу после использования;
- Аккуратно вымойте поверхность клинка в мыльной воде мягкой щеткой или ветошью, проведите ополаскивание дистиллированной водой;
- Избегайте использования жестких щеток;
- После процедуры предстерилизационной очистки высушите изделие.
- Автоклавирование можно проводить при температуре и давлении до 134 °C/3bar не более 5 минут.

#### Характеристики:

Выполнен из низкоуглеродистой нержавеющей стали марки AISI 304. Данная сталь устойчива к кислоте и выдерживает краткосрочное поднятие температуры до 900 градусов по Цельсию.

Габаритные характеристики:

Животное	Номер клинка	Длина клинка ММ	Ширина клинка ММ	Длина рукоятки ММ	Диаметр рукоятки ММ
Большие собаки	#4	255	17	145	29
Средние и мелкие собака	#3	200	14.4		
	#2	160	13.8		
Кошки, кролики	#1	100	11		
	#0	75	10.8		