

# Руководство пользователя

## Стол ветеринарный VET-6010 для УЗИ и ЭХО процедур с электроприводом



*VitaPet*  
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ  
В МАЛЕНЬКИХ СЕРДЦАХ

2025 г.

## Уважаемый покупатель!

Команда бренда VitaVet Pro благодарит вас за доверие и выбор нашей продукции. Мы искренне надеемся, что использование нашего оборудования будет надежной опорой для вас при работе с пациентами.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Стол ветеринарный для УЗИ VET-60100 может использоваться для ветеринарных клиник и стационаров для проведения эхокардиографических и ультразвуковых исследований у животных. Не шатается даже под беспокойным пациентом.

Благодаря специальным вырезам в столешнице стол обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста при проведении процедур.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Параметры
Длина столешницы, мм	1400
Ширина стола, мм	750
Высота стола, мм	400 – 950
Вес стола, кг	~ 53
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	100
Материал столешницы	Полипропилен
Материал каркаса	Металл, покрытый порошковой эмалью
Потребляемая мощность	200 Вт / ~ 1 А
Управление электроприводом	Ножное (педаль)

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество, шт.
1	Стол ветеринарный VET-6010	1
2	Руководство пользователя	1
3	Колеса	4

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ**

Стол поставляется в упаковке практически в собранном виде с необходимой комплектацией.

1. Необходимо распаковать изделие, убедиться в комплектности и наличие брака.
2. Расположите стол на ровной, горизонтальной поверхности. При необходимости выровняйте его при помощи регулируемых опор-фиксаторов, компенсируя неровности пола.
3. Подключите электропривод стола к питанию. Отрегулируйте стол на необходимый для работы уровень.
4. Стол готов к работе.

Производитель: ООО «МПО МТП РУС»

155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 31, офис 2