

Руководство пользователя

Стол ветеринарный VET-6050 для УЗИ и ЭХО процедур



*Vita*Vet.
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ
В МАЛЕНЬКИХ СЕРДЦАХ

2025 г.

Уважаемый покупатель!

Команда бренда VitaVet Pro благодарит вас за доверие и выбор нашей продукции. Мы искренне надеемся, что использование нашего оборудования будет надежной опорой для вас при работе с пациентами.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стол ветеринарный VET-6050 для УЗИ и ЭХО процедур может использоваться для ветеринарных клиник и стационаров для проведения эхокардиографических и ультразвуковых исследований у животных. Данный стол может использоваться для животных весом до 100 кг! Не шатается даже под беспокойным пациентом. Благодаря специальным вырезам в столешнице стол обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста при проведении процедур. Столешница изготовлена из гигиенического полипропилена. Материал прочный, безопасный и не подвержен коррозии. Выдерживает дезинфекцию любыми видами дезинфицирующих средств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Параметры
Длина столешницы, мм	1350
Ширина столешницы, мм	750
Высота стола, мм	900
Вес стола, кг	~ 23
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	100
Материал рабочей поверхности	Полипропилен
Материал каркаса	Металл покрытый порошковой эмалью

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Количество, шт
---	--------------	----------------

1	Столешница	1
2	Стяжки нижние	2
3	Ножки стола	2
4	Ключ шестигранный	1
5	Регулируемые опоры	4
6	Набор крепежных элементов	1
7	Руководство пользователя	1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Стол поставляется в упаковке в сложенном виде с необходимой комплектацией.

1. Необходимо распаковать изделие и приступить к сборке стола.
**При поставке часть фиксирующих болтов может быть уже прикручена.*
2. Расположите столешницу на ровном месте рабочей поверхностью вниз.
3. Прикрепите ножки к столешнице, вставляя их в пазы отверстий рамы (контура) стола. Зафиксируйте ножки при помощи болтов и ключа. Установите нижние стяжки под столом, фиксируя болтами на проножках. Закрепите с помощью ключа.
4. Стол готов к работе. По необходимости выровняйте стол при помощи регулируемых винтовых опор, компенсируя неровности пола.

