

Руководство пользователя

Стол ветеринарный VET-4010/VET-4020



*Vita*vet.
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ
В МАЛЕНЬКИХ СЕРДЦАХ

2025 г.

Уважаемый покупатель!

Команда бренда VitaVet Pro благодарит вас за доверие и выбор нашей продукции. Мы искренне надеемся, что использование нашего оборудования будет надежной опорой для вас при работе с пациентами. Для более комфортного и длительного использования рекомендуем вам ознакомиться с памяткой по уходу за изделием, которое находится на странице 5 данного руководства пользователя.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стол ветеринарный VET-4010/VET-4020 выполнен из нержавеющей стали высокого качества и может использоваться для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ в рамках ветеринарной клиники. Крючки расположенные по краям столешницы – удобная и необходимая вещь для фиксации животных во время осмотра и операций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Стол ветеринарный VET-4010	Стол ветеринарный VET-4020
Длина стола, мм	1300	1450
Ширина стола, мм	600	600
Высота стола, мм	850	850
Вес стола, кг	19,5	20,5
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	100	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь	
Материал каркаса	Металл, покрытый порошковой эмалью	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество, шт.
1	Столешница	1
2	Стяжки нижние	2
3	Ножки стола	2
4	Ключ шестигранный	1
5	Руководство пользователя	1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Стол поставляется в упаковке в сложенном виде с необходимой комплектацией. Необходимо распаковать изделие и приступить к сборке стола. **При поставке часть фиксирующих болтов может быть уже прикручена.*

1. Расположите столешницу на ровном месте рабочей поверхностью вниз. Для безопасности используйте подкладочный материал, чтобы не повредить столешницу.
2. Прикрепите ножки к столешнице, вставляя их в пазы отверстий рамы (контура) стола. Зафиксируйте ножки при помощи болтов и ключа.
3. Установите нижние стяжки под столом, фиксируя болтами на проножках. Закрепите с помощью ключа.
4. Стол готов к работе. По необходимости выровняйте стол при помощи регулируемых винтовых опор, компенсируя неровности пола.

Памятка по уходу за поверхностями из нержавеющей стали

Необходимо помнить, что все стали, включая стали с пометкой stainless **не являются абсолютно нержавеющими** могут быть подвержены разрушению **в агрессивных средах**. Вы видите пятна на столешнице из нержавеющей стали после ее очистки? Вероятнее всего эти пятна вызваны едким чистящим средством. Нержавеющую сталь необходимо содержать в чистоте и проводить профилактическую обработку для сохранения внешнего вида, проведения регулярной и генеральной уборки и конечно же для сохранения коррозионной стойкости.

Нержавеющая сталь покрыта толстым слоем оксида хрома, который защищает материал от коррозии, но этот **защитный слой все равно нуждается защите**. Если вы не чистите ее регулярно, загрязнения будут задерживать коррозионные агенты и уменьшать защиту, которая предотвращает коррозию. Ключевым моментом является очистка с использованием правильных чистящих средств.

КАК ПРОВОДИТЬ ЧИСТКУ СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ?

Проводить очистку столешницы из нержавеющей стали можно с помощью **воды, неабразивного и не содержащего хлор моющего средства**. Для базовой очистки теплой воды смешанную **с мягким нейтральным моющим средством** достаточно. Обязательно используйте **мягкую безворсовую ткань**. Дезинфекцию можно проводить **70% изопропиловым спиртом (ИПС) или же иными средствами не содержащими абразив и соединения хлора**.

Растворы хлора могут удалить защитный слой оксида хрома с поверхностей из нержавеющей стали что и станет причиной возникновения коррозии.

Возникшую коррозию можно удалить с помощью обработки нержавеющей стали раствором азотной или лимонной кислоты. Это удалит ржавчину и заставит защитный слой оксида хрома сформироваться снова. Хорошей идеей будет **добавить пассивацию к вашей регулярной процедуре очистки в качестве профилактической меры**. Это поможет предотвратить образование ржавчины и защитить ваши инвестиции в оборудование из нержавеющей стали.