


Двухкамерный УФ бокс

Germix

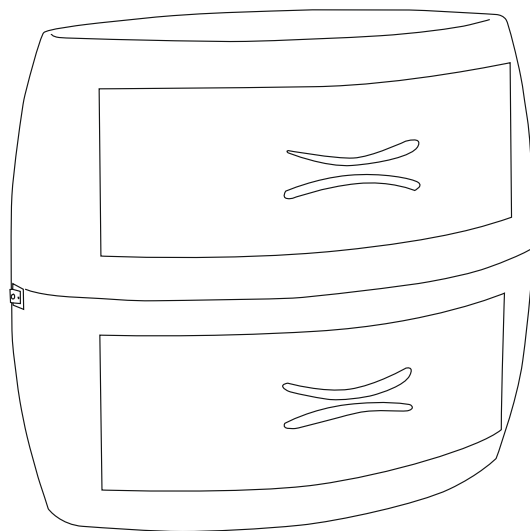

**Паспорт изделия
и руководство по эксплуатации**

Уважаемый Покупатель,

Поздравляем Вас с удачным приобретением!

Для того чтобы, работа с УФ боксом
была удобной и приятной, просим внимательно ознакомиться
с инструкцией.

Желаем успешной работы!

Содержание:	Стр.
1. Общие сведения	3
2. Комплект поставки	3
3. Технические характеристики	3
4. Правила техники безопасности	3
5. Подготовка и порядок работы	4
6. Техническое обслуживание	5
7. Гарантийные обязательства	6
8. Гарантийный талон	8

*Прежде чем использовать устройство, внимательно
ознакомьтесь с настоящим руководством.*

1. Общие сведения

Ультрафиолетовый бокс Germix применяется для обработки, стерилизации, дезинфекции и хранения парикмахерских, маникюрных и педикюрных инструментов. Устройство имеет функцию автоматического отключения, срабатывающую при выдвигании нижнего ящика, в котором расположен магнитный выключатель. Использование данного прибора гарантирует защиту от бактерий и болезнетворных микроорганизмов.

Благодаря наличию двух камер, в аппарате могут храниться несколько комплектов необходимых для процедуры инструментов.

2. Комплект поставки

1. Ультрафиолетовая камера — 1 шт.
2. Лоток для инструментов — 2 шт
3. УФ-лампа (расходный материал) — 1 шт.

3. Технические характеристики

1. Параметры сети: 220 В
2. Мощность: 10 Вт
3. Мощность лампы: 5-8 Вт
4. Частота: 50 Гц
5. Размер (ДхШхВ): 430х260х360 мм
6. Вес: 3,6 кг

4. Правила техники безопасности

1. Перед началом работы внимательно прочитайте паспорт и настоящее руководство по эксплуатации.
2. Перед началом работы удостоверьтесь, совпадает ли напряжение сети и аппарата.

3. Категорически запрещается использование аппарата в непосредственной близости с емкостями и оборудованием, которое может содержать жидкости или стать источником случайного попадания капель на аппарат.
4. Не храните прибор вблизи открытого огня или нагревательных приборов.
5. Не помещайте прибор в воду. Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания воды и прочих жидкостей внутрь корпуса. При возникновении подобной ситуации не прикасайтесь к прибору — немедленно отключите его от сети.
6. Не открывайте дверцу УФ бокса во время работы.
7. Запрещается помещать в камеру инструменты в упаковке. Прежде чем использовать УФ бокс убедитесь, что все инструменты распакованы.
8. После работы всегда отключайте УФ бокс от сети.
9. Храните УФ бокс в закрытом, чистом, хорошо освещенном, с постоянной температурой помещении без повышенного уровня влажности и пылеобразования.
10. Храните прибор в недоступном для детей месте.

Внимание: высокое напряжение! Разбирать и самостоятельно ремонтировать УФ бокс категорически запрещается. Нарушение этого условия ведет к аннулированию гарантии. При неисправной работе прибора обратитесь в офис продаж.

5. Подготовка и порядок работы

1. Извлеките аппарат из упаковки и установите на ровную и устойчивую поверхность.
2. Подключите прибор к электросети.
3. Нажмите главный выключатель, расположенный на боковой панели прибора.
4. Вставьте выдвижной ящик с инструментами, предназначенными для обработки.
5. Убедитесь, что ящик вставлен до конца и инструменты не лежат друг на друге, позволяя закрыть ящик полностью. Работа ультрафиолетовой лампы возможна только при закрытии ящика до конца.
6. Прибор имеет функцию автоматического отключения, срабатывающую при выдвигании нижнего ящика, в котором расположен магнитный выключатель.

7. Прибор гарантирует очищение от бактерий, которые обычно присутствуют на рабочих инструментах, и обеспечивает соблюдение гигиенических норм. Рекомендуемое время полной обработки: до одного часа.
8. По завершении работы с аппаратом нажмите на выключатель и отключите УФ бокс от сети электропитания.

6. Техническое обслуживание

Рекомендуется производить ежедневную очистку корпуса и внутренних поверхностей УФ бокса.

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети. Допускается самостоятельная очистка корпуса, крышки и внутреннего блока. Не используйте растворители, легковоспламеняющиеся и спиртосодержащие жидкости, а также чистящие порошки, которые могут поцарапать поверхность или внутренние панели корпуса. Используйте исключительно мягкие моющие средства, растворенные в воде. В качестве материала воспользуйтесь влажной мягкой тканью, не оставляющей при чистке волокон (не используйте ватные и аналогичные ватным тампоны). По завершении процедуры очистки протрите поверхности сухой тканью, чтобы убрать остатки влаги. Убедитесь, что следы моющего средства не остались на панелях УФ бокса.

Внимание! Не включайте УФ бокс сразу после чистки.

7. Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу изделия при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации и хранения, перечисленных в настоящем паспорте.
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия — 6 месяцев со дня приобретения.
3. Изделия, имеющие механические повреждения или эксплуатировавшийся с нарушением настоящего руководства, ремонту на условиях гарантии не подлежат.
4. Ремонт производится на предприятии-изготовителе или в специальных уполномоченных сервисных службах.
5. Изделие принимается в гарантийный ремонт только при наличии документов, подтверждающих покупку и заполненным гарантийным талоном.

Внимание! В случае обнаружения неисправности обращайтесь к производителю или в авторизованный сервисный центр. Самостоятельно ремонтировать изделие запрещено!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Гарантийный ремонт производится при наличии у покупателя правильно и четко заполненного гарантийного талона, и документа, подтверждающего покупку (чек, накладная).

Заполняется покупателем

Покупатель _____
Ф.И.О./Название организации

Условиями гарантии ознакомлен. К комплектации и внешнему виду претензий не имею. _____
Подпись

Заполняется продавцом

Продавец _____
Название организации

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Почтовый адрес _____

Код города и контактный телефон _____

Серийный номер изделия _____

Все поля обязательны к заполнению.

МП

Условия предоставления гарантии на оборудование

Настоящие гарантийные обязательства представляют собой гарантию Продавца на Оборудование, указанное в настоящем паспорте и приобретенное Покупателем у Продавца. Гарантия предоставляется на срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи. Дату изготовления см. на упаковке. Оборудования и распространяется на материальные дефекты, возникшие по вине производителя.

1. Гарантия распространяется только на оборудование, на которое при продаже его Покупателю был надлежащим образом оформлен Гарантийный талон.

2. Гарантийный талон заполнен полностью, разборчиво, серийный номер изделия (если имеется), наименование Продавца, дата продажи, подпись и печать продавца и другие разделы Гарантийного талона.

3. Настоящая гарантия не действует:

3.1 Если материальные дефекты возникли вследствие нарушения Покупателем правил использования, хранения или транспортировки Оборудования, или в результате действий третьих лиц, или обстоятельств непреодолимой силы.

3.2 Если содержащаяся в Гарантийном талоне информация неточна или неполна.

3.3 Если изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия.

4. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

4.1 Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их естественным износом (лампы, воск, полоски для депиляции и т. д.).

4.2 Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации, без предварительного письменного согласия Производителя или его дистрибьютора.

4.3 Ущерб в результате неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь этим, следующее:

а) использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по сборке, эксплуатации и обслуживанию; б) случайное или намеренное попадание инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части изделия, колебания напряжения, механическое повреждение, следы вскрытия корпуса, неправильная вентиляция и т.п.;

в) ремонт или монтаж неуполномоченными лицами.

5. Настоящая гарантия не имеет целью ущемить законные интересы Покупателя, предоставленные ему действующим законодательством России.

Производитель: Guangzhou Yorkma Industrial Co., Ltd.

Место производства: Rm1017, Times International Business Building, No.9 Xian Lie Nan Rd, Guangzhou, China.

Товар сертифицирован.