


# Ветеринарный биохимический анализатор skyla VB1 - Краткая инструкция к тесту UPC (отношение UPRO/UCRE)

## ◆ Please use Single Assay Analysis extension

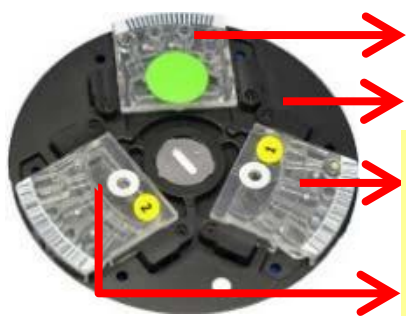

Балансир

Держатель

900-220 **UPC Kit-1**  
(UPRO) **UPC1**

900-220 **UPC Kit-2**  
(UCRE) **UPC- 2**

### Внимание:

При выполнении теста UPC возьмите **UPC Kit 1** (UPRO), **UPC Kit 2** (UCRE) и поместите на держателе балансир.




Дозатор на 50 мкл (Синий)

Наконечники дозатора (4 шт.)

Пробирки с дилуэнтном 110-940 (2 шт.)

\*Жидкость показана голубым только для указания уровня.

## Подготовка проб и процесс анализа: проба Моча

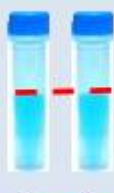

① ②

Шаг-1



①

Шаг-2



Шаг-3



①

Шаг-4



②

Шаг-5



Шаг-6



Шаг-7

Для набора UPC Kit-1 (UPRO) UPC-1

Приготовьте 2 пробирки с дилуэнтном, центрифугируйте их в течение нескольких секунд, чтобы не терять жидкость на крышке

С помощью пипетки на 50 мкл отберите пробу мочи и добавьте пробу в пробирку с дилуэнтном 1 по стенке пробирки

После добавления пробы плотно закройте крышку и переверните пробирку около 10 раз для тщательного перемешивания.  
\* Этап перемешивания

Пропустить

Замените наконечник дозатора. Возьмите новую пробирку с дилуэнтном 2. С помощью дозатора добавьте 50

Пропустить

Выполните \*Стадию перемешивания в пробирке с дилуэнтном 2

Удерживая горизонтально держатель, поместите его в отсек для диска анализатора. Запустите тест.